

らくだ ニュース

2022年 2月号

車いすは歩行が困難になった人の移動手段として大変有効ですが、
誤った操作方法で重大な事故にも直結します。




Case2
フットサポートを踏んだ状態で
立ち上がり、車いすごと転倒し
そうになる



Case6
利用者の足がフットサポートから
落ちてしまい、車いすに巻き込み
そうになる




Case114
ブレーキをかけずに立ち上がる
うとしたため、後方に転倒しそ
うになる

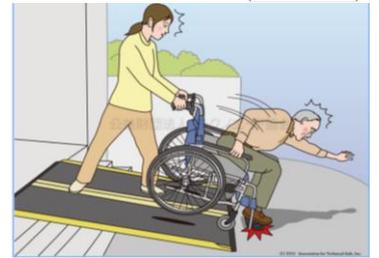

Case117
前向きで下りたところフットサ
ポートが地面にひっかり、転落
しそうになる



Case124
テーブルに手をぶつけ、ケガを
しそうになる

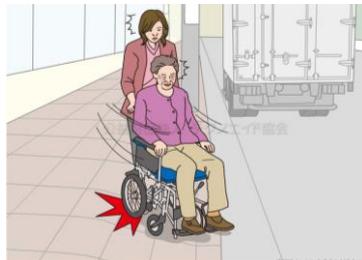

Case144
傾斜に気づかず流れてしまい、
車道に飛び出しそうになる

本ニュースはテクノエイド協会のヒヤリハット集
から抜粋しています。HPには福祉用具を使った
ヒヤリハットが多く紹介されています。

車いすのヒヤリハットはとくに
多いので、ぜひご覧ください。
勉強になりますよ。



大田病院リハビリ科で学習会を開催しました。

メーカー(ホクメイ)をお招きし、昨年12月21日に大田病院リハビリ科で「家屋評価時に提案できるレンタル手すり」として学習会を開催しました。廊下に手すりを立ててオプションパーツなどを取り付け、バリエーションを展開しました。触れる機会が少ないオプションパーツなど実際に触れていただき、終了後のアンケートには「担当患者様に使えるかも！」や「今後も新しい商材など実際に見てみたい！」

などと高評価でした。今後も第2回、第3回と開催します。



◎お問い合わせ・ご用命は

介護ショップらくだ

東京都大田区大森東3-9-18

TEL : 03-5762-8568

FAX : 03-5762-8569

