

# 人気商品・注目商品のご紹介

Vol.12



今回は、歩行器で問合せの多い **“抑速ブレーキ”** と **“スローダウンブレーキ”** の違いをご紹介します。

介護ショップらくだ  
TEL:03-5762-8568

## 抑速ブレーキとは？

ブレーキの強度は 3段階（強・中・弱）で設定できます。  
急加速すると自動的にブレーキが働いて減速します。  
通常の歩行速度ではブレーキはかからず、快適に歩くことができます。

Point : “加速したとき” に自動でブレーキが掛かる

使用例 : 坂道の下り、パーキンソン病で歩行が安定しにくい方、急加速する場面があるとき

デメリット : ブレーキの利き具合が顕著なため、押していて重い、疲れると感じる方も…



～機種例～

 ハンディウォーク 抑速ブレーキ付 <b>1割負担：400円</b>	 リトルターン抑速付 <b>1割負担：400円</b>	 ハッピーⅡ抑速 <b>1割負担：400円</b>
---	---	---



## スローダウンブレーキとは？

ブレーキの強度は無段階で調整できます。

（抵抗器がタイヤに当たる強さで調整）

道路の傾斜や歩行速度に関わらず、一定の抵抗を掛けてタイヤの回転を抑制することでスピードが出過ぎないようにします。

Point : 抵抗器は常にタイヤに当たり続けるので、“常に加速しにくい状態”がつけられます。

使用例 : 歩行が不安定で、歩行器が進む速さに足が追い付かない方 等

デメリット : 左右のタイヤに均等に抵抗を掛けることが難しい…



～機種例～

 ハンディウォーク スローダウンブレーキ <b>1割負担：400円</b>	 サルジョル <b>1割負担：500円</b>	 アルコールウィット-T <b>1割負担：350円</b>
---	--	---

